


12. Fejlfinding


Hvis der opstår problemer under brug, læses i den følgende fejlfindingsliste for at finde en løsning på problemet.


Problemet er beskrevet som et spørgsmål, som du kan besvare og løse ved at følge de vedhæftede trin.

Hvis dit problem ikke kan blive løst ved at bruge denne liste, skal du øjeblikkeligt holde op med at bruge Sleep Position Trainer. Gå til <http://www.nightbalance.dk/support> eller kontakt din autoriserede NightBalancedistributør.

<p>“Indikatorlyset viser en farve, og jeg ved ikke hvad det betyder.”</p>	Grønt (konstant)	SPT er tilsluttet en strømkilde (adapter eller pc) og er fuldt opladet.
	Grønt (langsomt blinkende)	SPT er tilstrækkeligt opladet til at kunne bruges i løbet af førstkommende nat (mindst 8 timers brug).
	Grønt (hurtigt blinkende)	SPT er opladet og kan bruges i mindst 8 timer efter at være blevet taget fra laderen.
	Orange (langsomt blinkende)	SPT skal oplades før næste brug.
	Orange (hurtigt blinkende)	SPT er i gang med at blive opladet og skal oplades yderligere før næste brug.
	Rød (konstant eller blinkende)	SPT skal genstartes . Se fejlfindingsafsnittet “genstart” for instruktioner.
	Blå (blinkende)	SPT viser antallet af vibrationssignaler, som blev givet i løbet af den forgangne nat.
	Hvidt (blinkende)	SPT viser antallet af gange, du har sovet på ryggen i løbet af den forgangne nat.
	Violet (konstant)	Advarsel! Tag ikke apparatet fra pc'en. Apparatet er i gang med at installere nyt firmware. Dette vil tage ca. et minut. Vent med at tage apparatet fra pc'en, til det violette lys forsvinder.

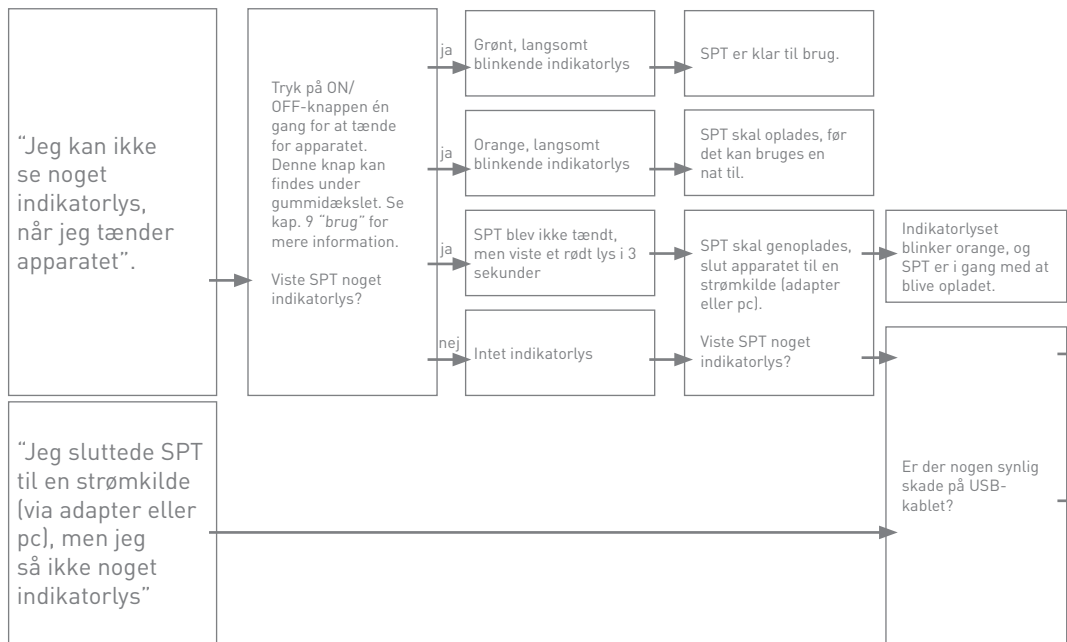

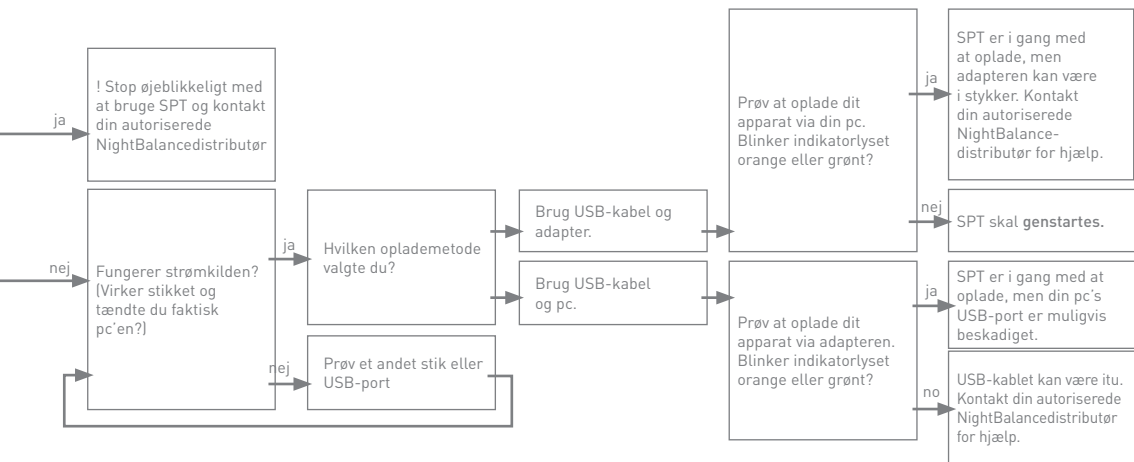

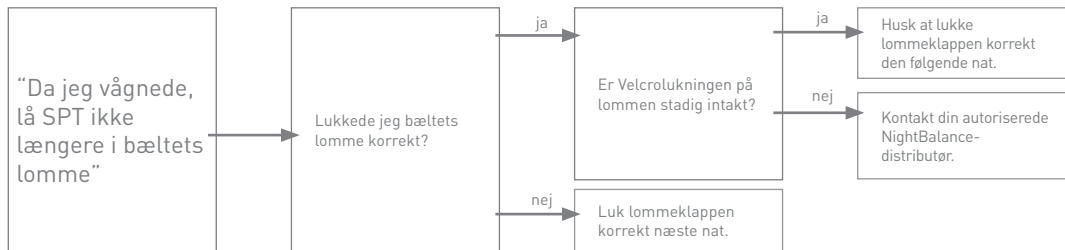

Genstartsinstruktioner

